



Bitte beachten Sie auch unser HD-Video zu Ihrer Unterstützung bei der Blutentnahme <http://tinyurl.com/BloodCollectionDE>



Kurzanleitung – RIDASCREEN® Foodscreen Blood Collection Kit

Kapillarblutentnahmeset für Typ-III Nahrungsmittelallergie-Tests

Allgemeine Informationen

- Falls Sie blutverdünnende Medikamente nehmen oder eine Blutgerinnungsstörung haben, sollten Sie das Kit nicht zur Blutentnahme einsetzen, außer nach Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Therapeuten.
- Die enthaltenen Lanzetten sind sterile Einmalstechhilfen. Sobald ein Einstich auf der Haut erfolgt ist, wird die Nadel automatisch in die Sicherheitslanzette zurückgezogen, um eine einfache Entsorgung zu ermöglichen.
- Die Lanzetten haben eine Einstichtiefe von 2,0 mm. Vorsicht beim Gebrauch bei kleinen Kindern: Der Abstand zwischen Fingeroberfläche und Knochen könnte nicht ausreichend sein, so dass der Gebrauch der Lanzette zu Verletzungen führen könnte. Konsultieren Sie Ihren Arzt oder Therapeuten.
- Minderjährige sollten das Blutentnahme-Set nicht ohne das Einverständnis der Eltern einsetzen.
- Es wird nicht empfohlen, die Lanzette bei Kindern unter einem Jahr einzusetzen.
- Blutproben sollten nicht von einem geschwollenen oder zuvor punktierten Finger, dem Ohrläppchen oder kleinen Finger entnommen werden.
- Von Kindern fernhalten.

Verwendungszweck

- Es handelt sich um ein Mittel zum Sammeln und Transport einer humanen Kapillarblut-Probe in das Labor.
- Ihre Probe muss spätestens zwei Wochen nach der Blutentnahme im Labor eingetroffen sein.

1



Inhalt:

- Gebrauchsanweisung
- Blutentnahmekarte
- Lanzetten
- Pflaster
- Alkoholtücher

2




Regen Sie Ihren Kreislauf an: Trinken Sie Wasser. Bewegen Sie Ihre Arme. Waschen Sie Ihre Hände in warmem Wasser.

3



Beschriften Sie die Karte (Vorname, Name und Tag der Blutentnahme). Keine Tinte verwenden!

4

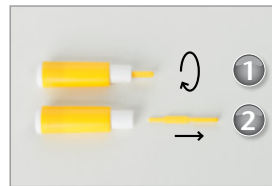

- Drehen Sie die gelbe Verschlusskappe der Lanzette.
- Ziehen Sie diese heraus.

5




Reinigen Sie Ihren Finger mit dem Alkoholtupfer und lassen Sie ihn trocknen.

6



Positionieren Sie die Lanzette an der Seite Ihres Ringfingers und drücken Sie die Lanzette.

7

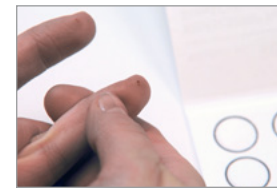

Massieren Sie Ihren Finger über die gesamte Länge.

8



Setzen Sie den Blutstropfen auf die Karte und lassen Sie ihn einziehen.


9



Füllen Sie mindestens 4 Kreise komplett aus.

✓ richtig ✗ falsch

Prüfen Sie, ob die Rückseite der Karte auch komplett durchtränkt ist.

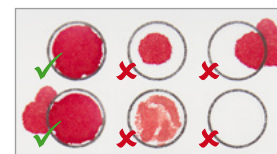

Vorderseite



Rückseite

10



Trocknen Sie die Karte über Nacht an der Luft. Packen Sie die trockene Karte zusammen mit dem Trockenbeutel in die Plastiktüte.

11



Packen Sie die Plastiktüte mit der Karte sowie die Laborformulare in den Umschlag und senden Sie diesen an das Labor.